



EMARIN SDA S.A.

PRODUCTOS DIAGNOSTICO CLINICO "SDA"

EMILIA TELLEZ 5470

TELEFONO: 22268436

ÑUÑO A - SANTIAGO

Email: emarinsda@gmail.com

TEST DE DETECCION DE PRODUCCION DE β -LACTAMASA EN ESPECIES DE STAPHYLOCOCCUS

Microorganismo: S.aureus con Halo de Inhibición de 29 mm

Método: Difusión con Discos

Medio: Muller Hinton

Inóculo: Estándar para método del disco

Incubación: 35° C

Tiempo: 16-18 hras.



Prueba de detección de β -Lactamasa en Halo de disco de penicilina positiva. El borde de la zona es nítido o como un acantilado que indica producción de β -Lactamasa



Prueba de detección de β -Lactamasa en Halo de disco de penicilina negativa. el borde de la zona es borroso o como una "playa" que indica que no hay producción de β - Lactamasa.

Ref: CLSI M100S 26th ed. ENERO 2016