



EMARINSDA S.A.

PRODUCTOS DIAGNOSTICO CLINICO "SDA"

EMILIA TELLEZ 5470

TELEFONO: 27690402

ÑUÑO A - SANTIAGO

ZONA D

Cepas de Staphylococcus aureus Resistente a los macrólidos y cepas de Staphylococcus spp. coagulasa negativas, pueden tener resistencia constitutiva o inducible a la Clindamicina ; o pueden ser resistentes sólo a los macrólidos.

La resistencia inducida a la Clindamicina se puede detectar usando el Test de Aproximación de Discos, poniendo el disco de Clindamicina 2 mcg a 15-26 mm del disco de Eritromicina 15 mcg, como procedimiento normal del método de difusión del disco.

Después de la incubación, los microorganismos que no muestran "aplanamiento" del halo de la Clindamicina deberían reportarse como "Clindamicina Susceptible", por otra parte, aquellos que presentan "aplanamiento" del halo de la Clindamicina adyacente al disco de Eritromicina (REFERIDA COMO ZONA "D") indica Resistencia Inducible a la Clindamicina. Estas cepas deben informarse como "CLINDAMICINA RESISTENTE".